



# Installations og brugermanual for iOS - brugere af Akutudkald.

Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på iOS modeller fra App Store.

Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken mobil man har.

App`en kræver mininum version 10.X.X.

Har du allerede en app på din telefon, skal du først afinstallere den, inden du kan installere en ny.

## 1: INSTALLATIONSDELEN




Find ikonet App Store på din telefon og tryk på denne.

## 2:




Tryk på "Søg"

3:

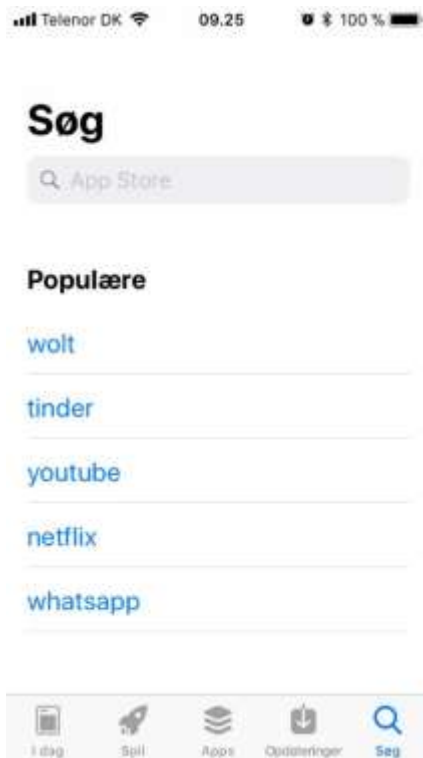

Dette billede vises.


4:

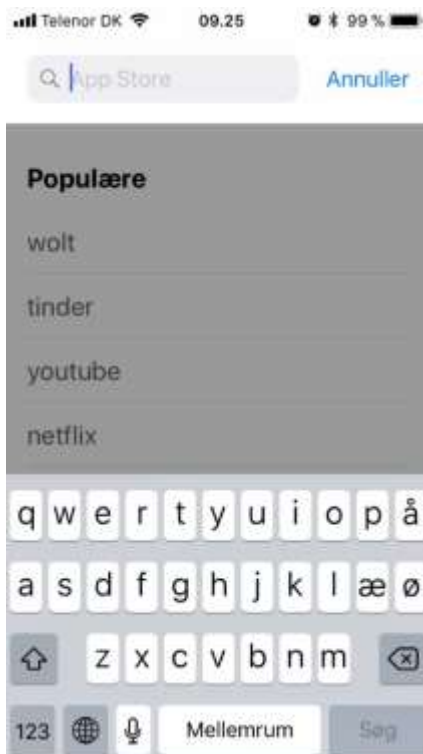

Marker at du vil skrive i søgefeltet

Skriv "akutudkald" (store eller små bogstaver) og tryk "Søg"

5:

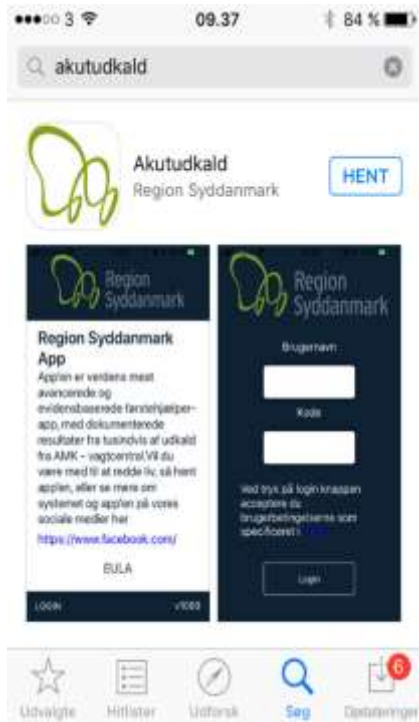


Scroll ned til du finder FirstAED app'en



Tryk "HENT"

6:

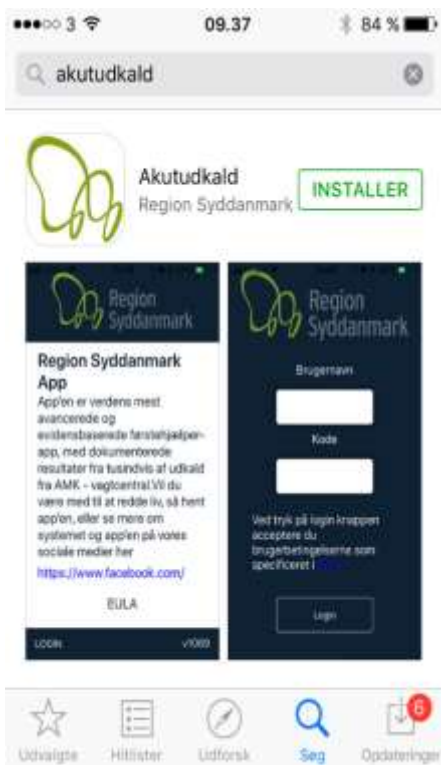

Tryk "Installer"

7:




Indsæt dit Apple-id (hvis du bliver bedt om dette) og tryk "Log ind"

8:



App`en bliver nu hentet

9:

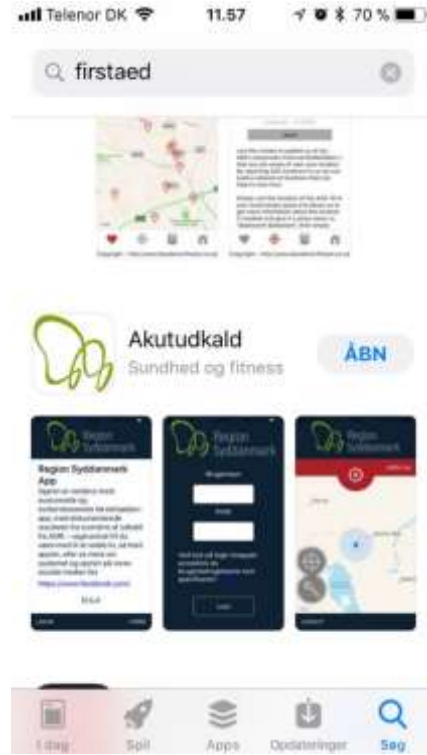

Tryk "ÅBN"

10:



Tryk "Tillad"

11:




Tryk "LOGIN"

12:



Dette billede vises nu

13:

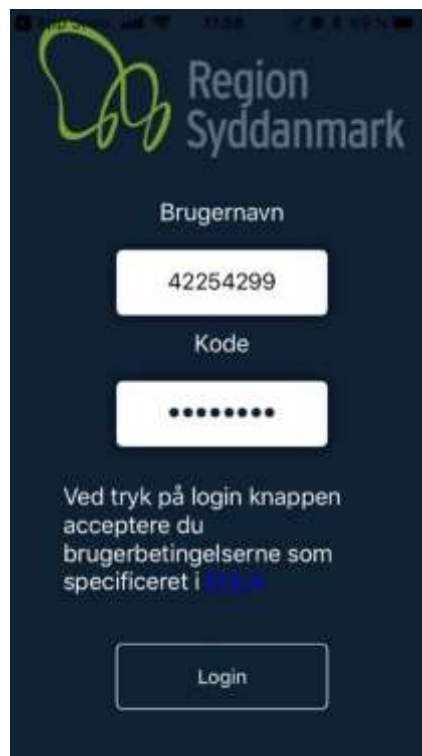


Indsæt det Brugernavn og Kode  
Du har modtaget pr. SMS.

14:



Tryk "Tillad altid"

15:

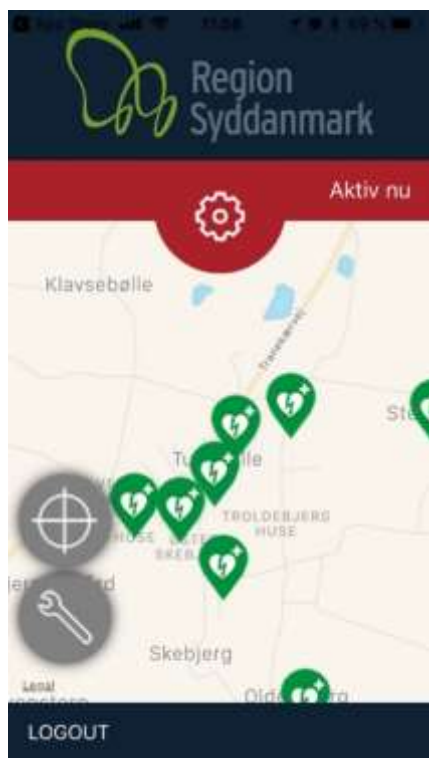

Dette billede vises og app'en er nu installeret.

Tryk på "møllehjulet" for at gå ind i indstillinger.


Her kan du evt. melde dig ud i en periode.

Den blå prik viser din position og de grønne dråber viser hjertestarterne i området. Hvis der er gule dråber, så indikerer de hjertestartere, som ikke er tilgængelige 24/7. Kan du ikke se dråberne, skal du lige zoome ind.

16:



17:

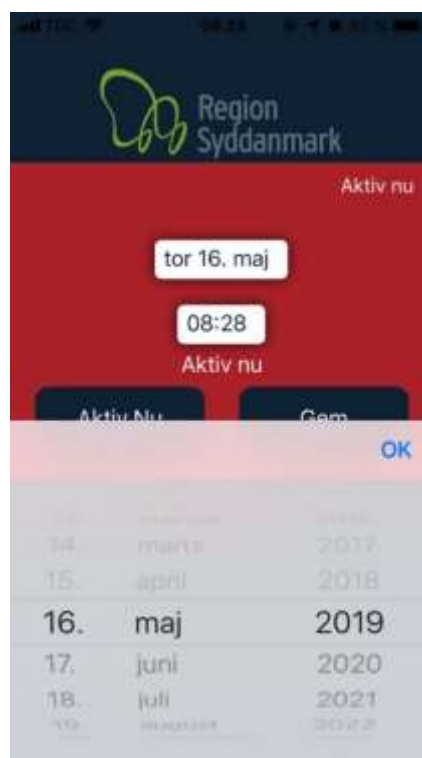

Hvis du vil skifte tidspunkt for enten dato eller tid, trykker du først på dato og scroller ned til den ønskede dato, hvorefter man trykker på "OK".




18:




Tryk herefter på "Gem".

19:

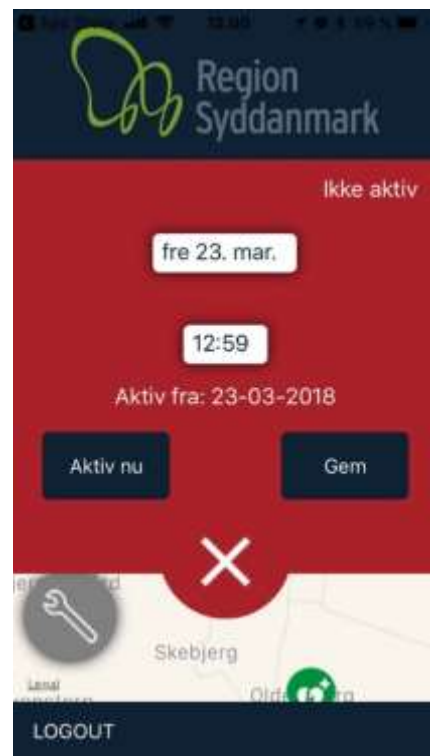

Man får nu vist, hvornår man igen er aktiv fra: enten "Aktiv nu" eller et valgt tidspunkt.

20:

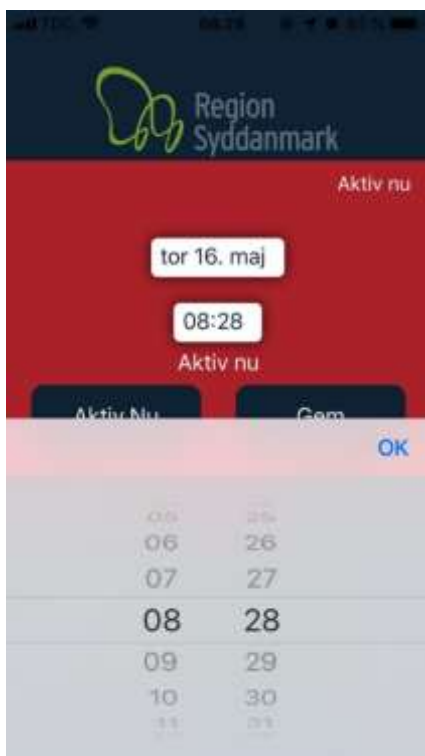

Det samme gøres igen, hvis man vil Ændre tidspunkt

21:




Den nye ønskede tid fremstår nu. Tryk "GEM" og tryk på pilen for at lukke menuen.





## 22:



Ved tryk på "svensk nøglen"  fremkommer dette billede

Her har du mulighed for at indstille, hvilken korttype du ønsker at se.


Lige som du har mulighed for at indstille, hvilken alarm lyd, du ønsker – Se pkt. 24

"Eksterne Enheder" vises kun, hvis du ejer din egen hjertestarter og har købt en Beacon til mobile hjertestartere.

Du må aldrig trykke på Logout, hvis du vil melde dig ud, foregår det inde i "Møllehjulet" – se pkt. 16 - 21.


Her vises senest opdaterede position samt den version, du har opdateret til (dette tal vil løbende stige i takt med, at der kommer nye versioner).

## 23:

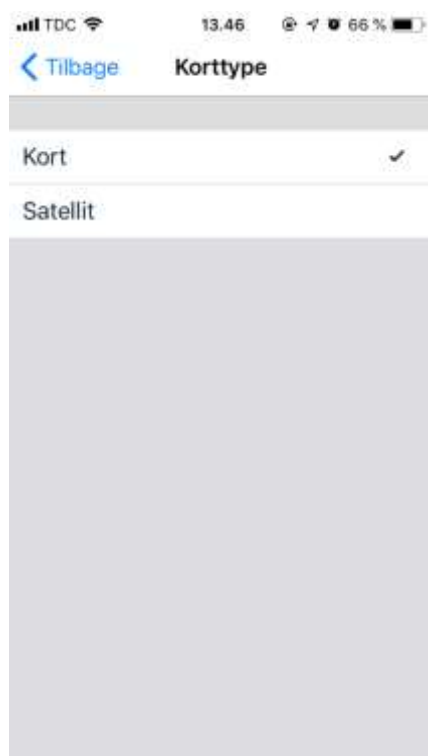


Her kan du vælge enten kort eller Satellit – Se pkt. 25 - 26

## 24:

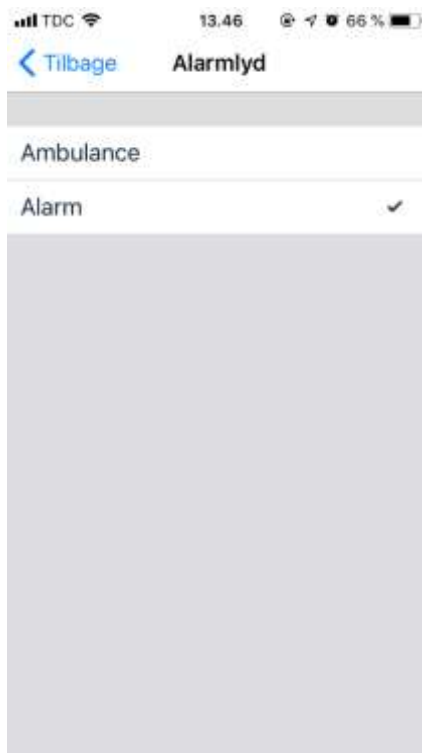


Her kan du vælge enten Alarm eller Ambulance

25:

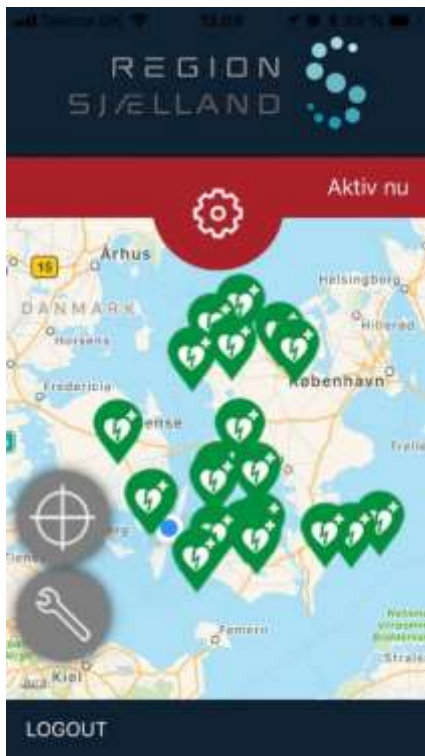

Normal visning

26:

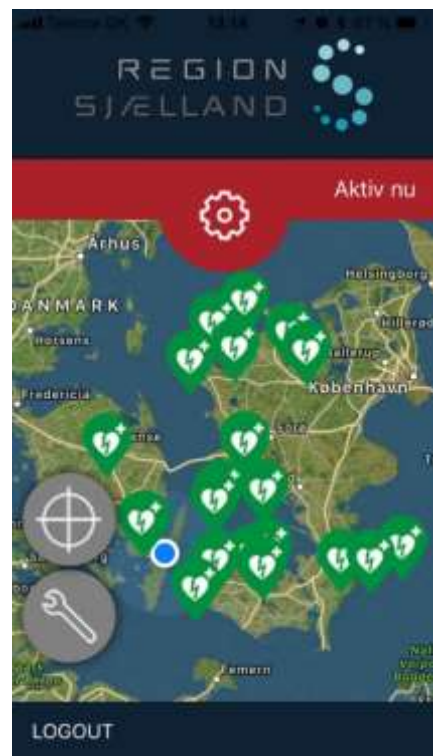

Satellit

27:



Afslutningsvis skal man gå ud af App'en og ind i indstillinger

28:



Scrol ned og find FirstAED app'en. Gå ind i denne.

29:



Gå ind i "Meddelelser"

30:



Indstillingerne skal se ud som på billede 30. HUSK at "Vedvarende" skal være markeret. Ved ældre modeller skal "Alarm" markeres.

31: DRIFTDELEN




Ved alarm vælger man enten "JA" eller "NEJ". Ved "JA" afvent.

32:



33:

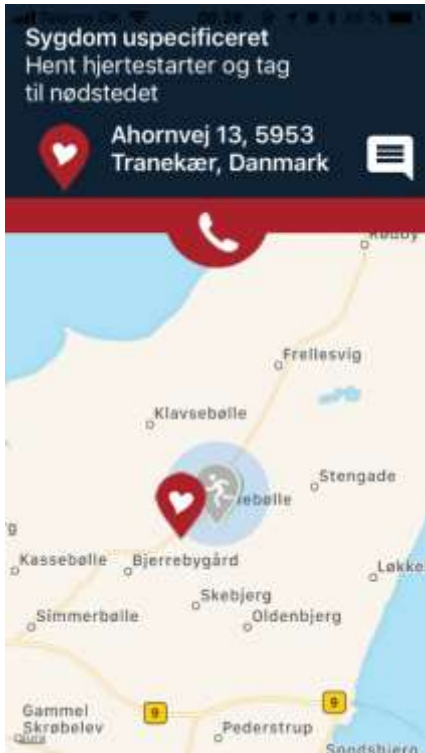


Bliver du kaldt får du følgende billede

Når du er blevet valgt, ses opgaven.

Ved tryk på hjertestarterikonet, ude til venstre, Skifter billedet til hjertestarteren og adressen på denne. Se billede 34.


34:

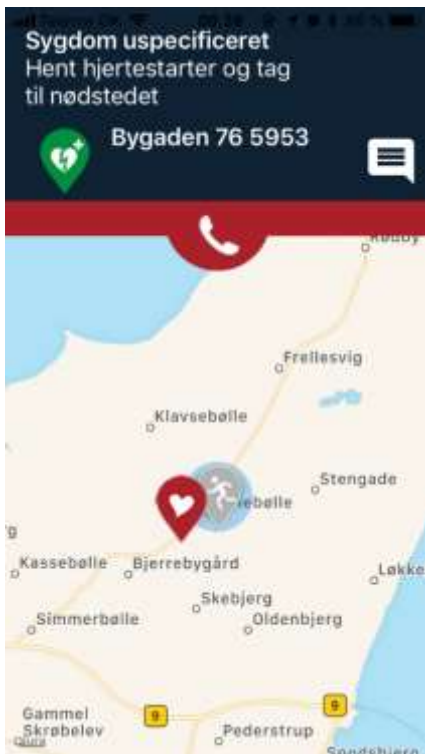

Når du er blevet valgt, ses opgaven.

Ved tryk på hjertestarterikonet, ude til venstre, Skifter billedet til hjertestarteren og adressen på denne. Se billede 33.


35:

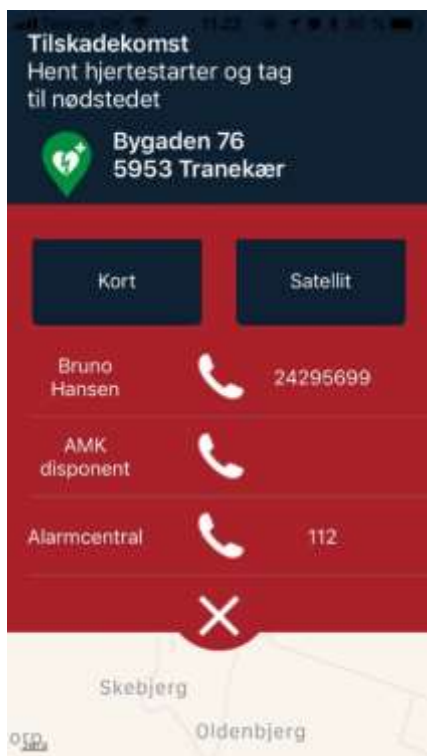


Ved tryk på telefonen kan man se telefonnumre på de andre akuthjælpere og AMK. Scrol ned for at se flere numre. Tryk på nummeret for at ringe op. Man kan ligeledes skifte mellem Kort og Satellit under udkaldet, hvis man har brug for det.

Tryk på krydset for at komme tilbage til kortet.

36:

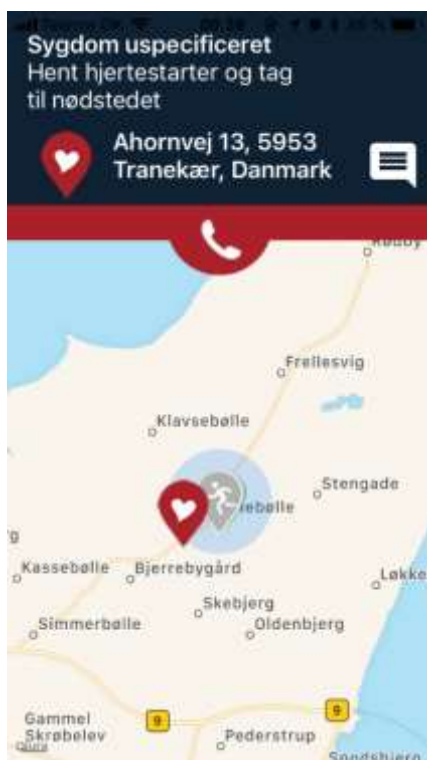


37:

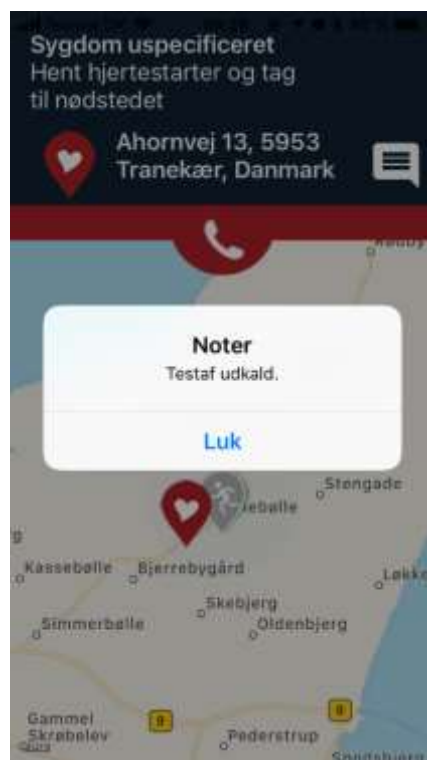

Hvis der vises et "Note-felt" skal du lige tjekke dette, da der vil være en besked til dig.

38:

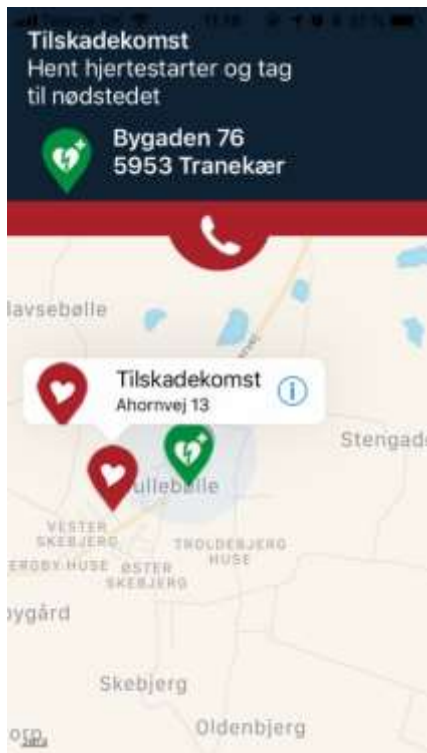


Ved tryk på enten hjertestarteren eller nødstedet kan man komme videre til en talt navigation, såfremt man ønsker dette. Tryk på informationsikonet for at komme videre til navigationen.

**HUSK:** Hvis du får alarmer, når du er hjemme på dit eget WiFi, så vil du kortvarigt miste forbindelsen, når du forlader hjemmet, inden du kommer på mobilens netværk, og din positionering er fundet på ny.

Hvis dit Wifi ikke virker, skal du ligeledes huske at koble dig på telefonens net 4G.

39:




Du kan altid komme tilbage til kortet ved tryk på Ikonet 



Vælg hvilken transport man ønsker, og tryk "START"



40:

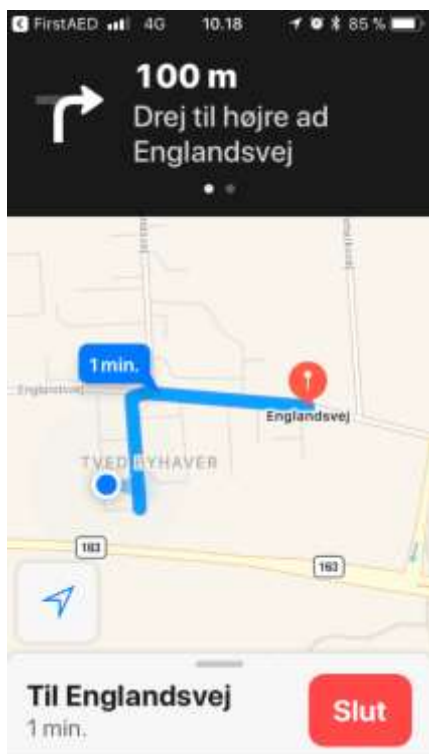

Den talte navigation starter.  
Tryk slut hvis man vil starte en ny navigation f.eks. fra hjertestarteren til nødstedet.

Tryk på ikonet øverst for at komme tilbage.



41:



Når patienten er afleveret på hospitalet fremkommer en indsatsjournal, som skal udfyldes.



Når udkaldet afsluttes fra AMK, så fremkommer der en indsatsjournal, som vises nederst på kortet



42:

Tilbage

Region Syddanmark Test

Indsatsjournal

Dato: 2018-05-11 11:18:38  
Adresse: Ahornvej 13  
Din rolle:  
Kategori: tilskadekomst

1. Ankomst før ambulance? \*

Ja

Nej

0%

De oplysninger som vi kender i forvejen, er fortrykt.



Tryk først på pilen, når alt er udfyldt.

43:

Tilbage

2. Lejring \*

Aflåst sideleje

Tillempet aflåst sideleje

Ingen af ovennævnte

3. Hjerte-/lungeredning? \*

Ja

Nej

0%

44:

Tilbage

2. Lejring \*

Aflåst sideleje

Tillempet aflåst sideleje

Ingen af ovennævnte

3. Hjerte-/lungeredning? \*

Ja

Nej

0%

45:

Tilbage

3. Hjerte-/lungeredning? \*

Ja

Nej

4. Hjertestarter anvendt? \*

Ja

Nej

5. Frie luftveje? \*

0%

46:

Tilbage

4. Hjertestarter anvendt? \*

Ja

Nej

Antal stød

2

5. Frie luftveje? \*

Ja

Nej

0%

47:

Tilbage

5. Frie luftveje? \*

Ja

Nej

6. Lommemaske? \*

Ja

Nej

7. Forbinding?

0%

48:

Tilbage

7. Forbinding?

Ja

Nej

8. Jeg gjorde en forskel? \*

Ja

Nej

9. Behov for debriefing? \*

0%

49:

Tilbage

9. Behov for debriefing? \*

Ja

Nej

10. Evaluering \*

Positiv

Negativ

11. Eventuelle bemærkninger

0%

50:

Tilbage

9. Behov for debriefing? \*

Ja

Nej

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt til debriefing.

10. Evaluering \*

Positiv

Negativ

0%

Ønsker du debriefing vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

51:

Tilbage

10. Evaluering \*

Positiv

Negativ

11. Eventuelle bemærkninger

Test udkald.

0%



Angiv din oplevelse med mulighed for at skrive kommentar.




Skriv gerne en bemærkning.



Tryk herefter på pilen for at afslutte


52:

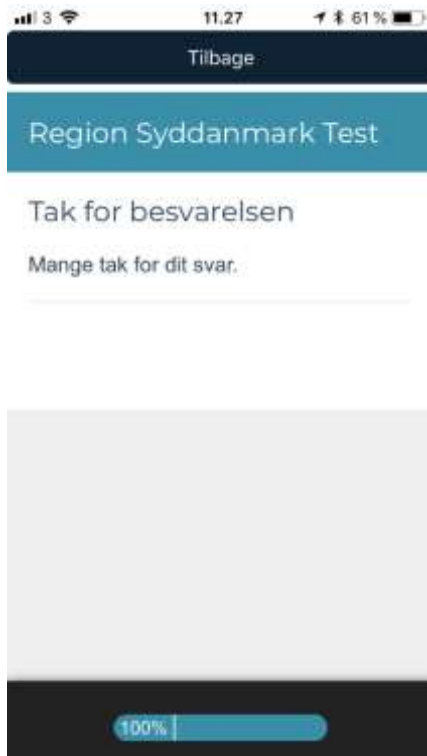

Er alt udfyldt, får man denne besked.

Hvis man har glemt noget, bliver man ført tilbage til det manglende punkt.

53:

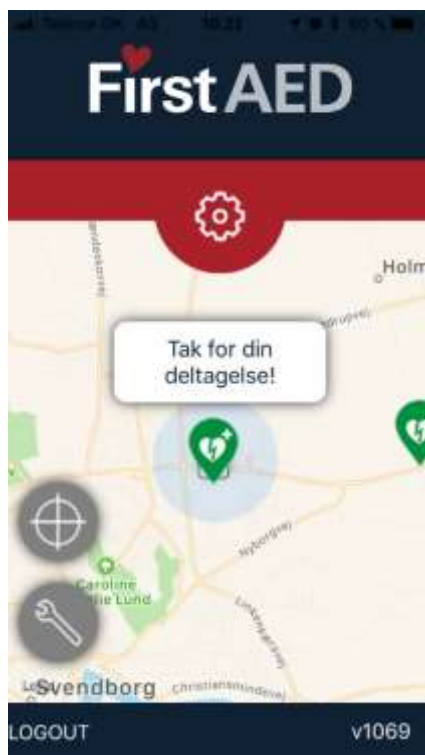

Efter endt kald får man denne besked.

54:



Det kan være en god idé at sætte Akutudkald app`en ned på adresselinjen, så den nemt kan ses og tilgås fra alle sider.

55:



HUSK at app`en altid skal køre i baggrunden for at virke. Dette gøres ved at dobbelt klikke på den runde "hjem-knap" nederst på din telefon, hvorved du kan se, FirstAED skærmen i baggrunden



På de nyere iPhones skubber man i stedet op og til højre.

NB!!! Hvis skærmen ikke kører i baggrunden, vil systemet bruge kostbar tid på at søge dig. Derfor SKAL denne skærm ALTID køre i baggrunden.

Hvis man vil meldes ud, er det derfor vigtigt, at man gør det inde i app`en som vist på billederne 16-21 og IKKE ved bare at scrolle baggrunds-skærmen væk.

56:



Tjek jævnligt om der er opdateringer og opdater.



Der vil stå et tal her, hvis der er nye opdateringer.