



# Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minimum version 5.X.X.  
Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken mobil man har.

Juni 2019

## 1: INSTALLATIONSDELEN



Du modtager en besked fra FirstAED i din Beskedboks – Åbn denne.

## 2:



Du har modtaget en SMS med et brugernavn samt en kode.  
Notér dette til senere brug.

3:



Find ikonet "Play Butik" på din telefon og tryk på denne.


4:



Skriv i søgefeltet – se billede 5

Du får nu et billede, som kan variere alt efter, hvornår du går ind i Play Butik.

5:

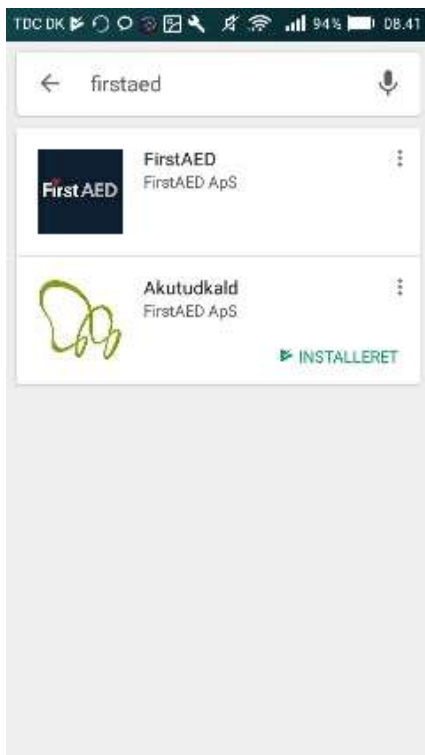


Skriv "firstaed"




Vælg "FirstAED" ikonet

6:

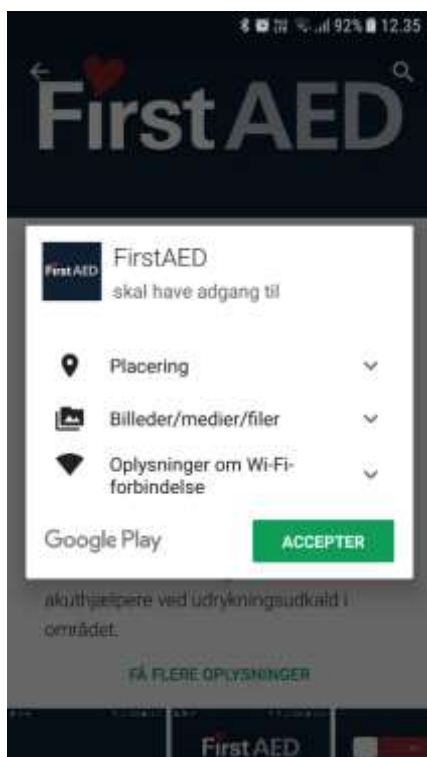


Tryk "ACCEPTER"

7:

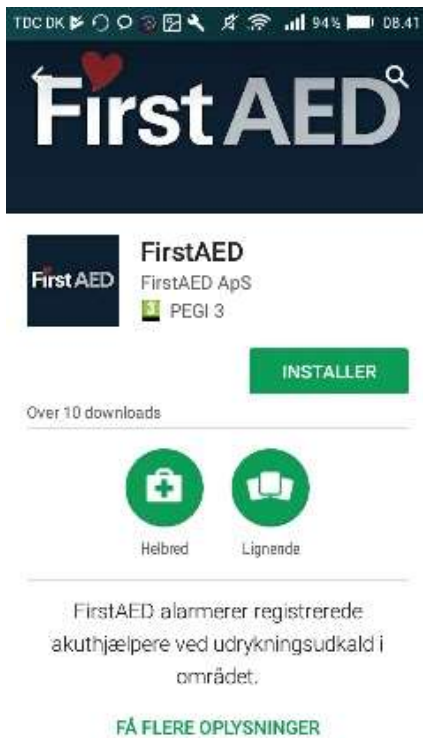


Tryk "INSTALLER"

8:

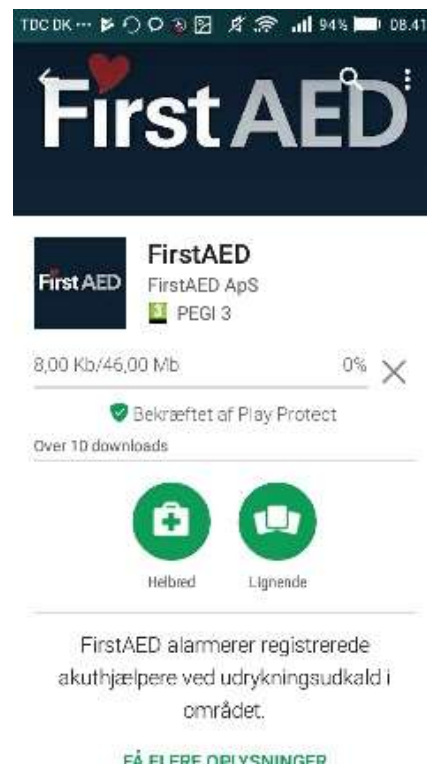


App'en bliver nu installeret.

9:

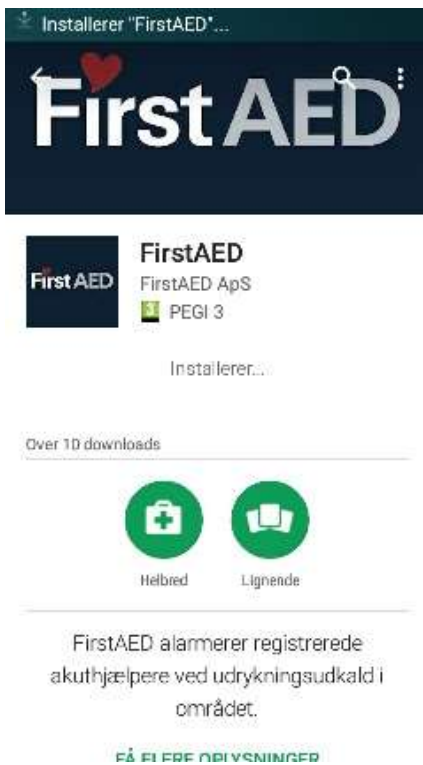

Vent mens der installeres

10:

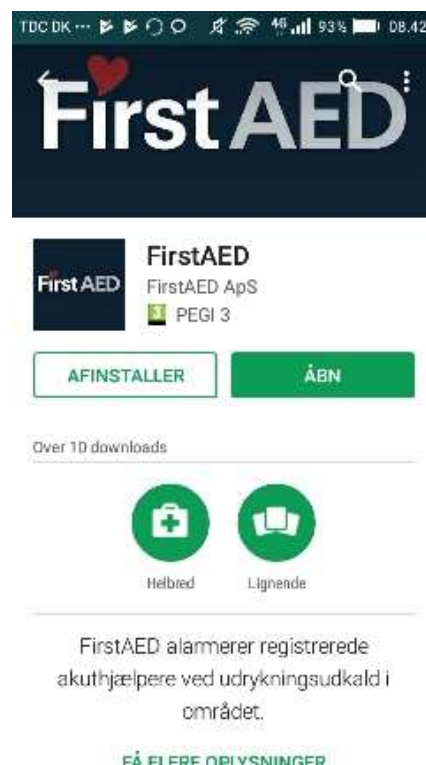

Tryk "ÅBN"

11:




Skærmen bliver nu sort

12:



Tryk "LOGIN" i nederste venstre hjørne

13:

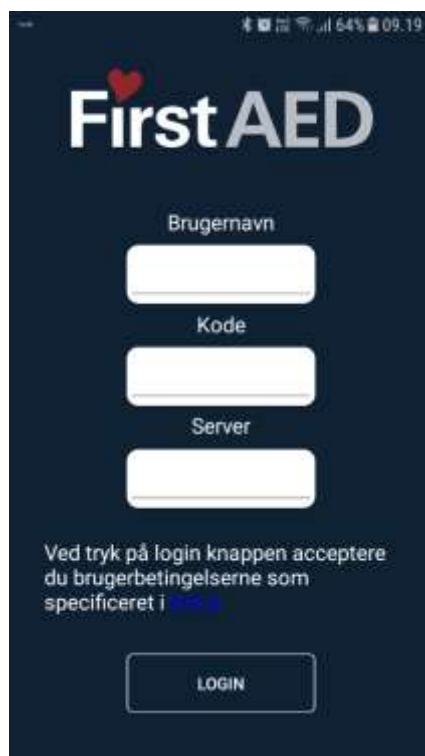


Indsæt Brugernavn og Kodeord, du modtog pr. SMS fra FirstAED.

14:



15:

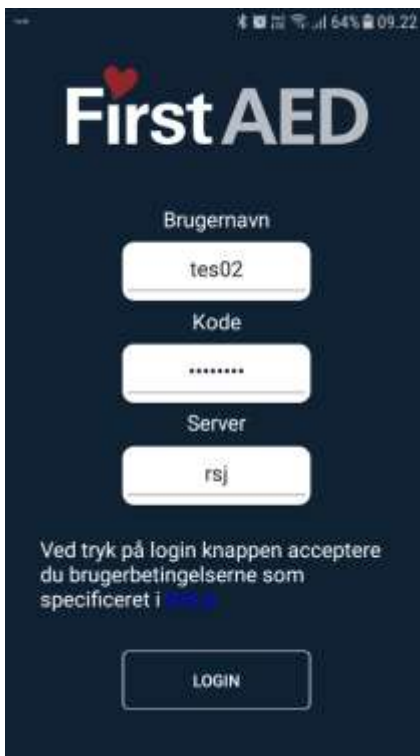


Tryk "LOGIN"

16:



Når denne skærm vises, tryk "Tillad altid".

17:

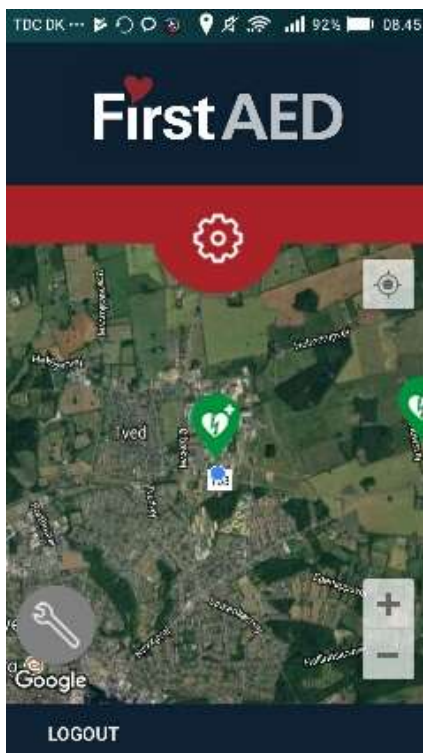

Dette kort vises

Den blå prik viser din position.

De grønne viser hjertestarterne i området.

Tryk på +/- for enten at formindske eller forstørre billedet.  
Ved tryk på "svensk" se billede 18.

## 18:



Ved tryk på "svensknøglen" fremkommer dette billede



Her har du mulighed for at indstille, hvilken korttype du ønsker at se.

Lige som du har mulighed for at indstille, hvilken alarm lyd, du ønsker – Se pkt. 19 – 22



"Eksterne Enheder" vises kun, hvis du ejer din egen hjertestarter og har købt en Beacon til mobile hjertestartere.




Du må aldrig trykke på Logout, hvis du vil melde dig ud, foregår det inde i "Møllehjulet"



Her vises senest opdaterede position samt den version, du har opdateret til (dette tal vil løbende stige i takt med, at der kommer nye versioner).

## 19:

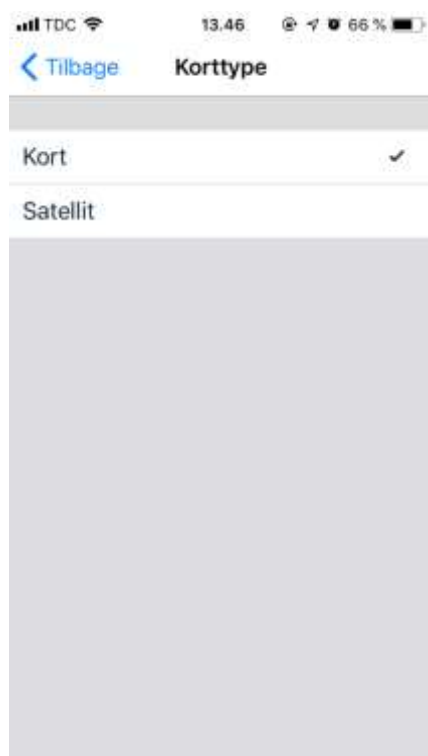

Her kan du vælge enten kort eller Satellit – Se pkt.


## 20:



Her kan du vælge enten Alarm eller Ambulance




21:

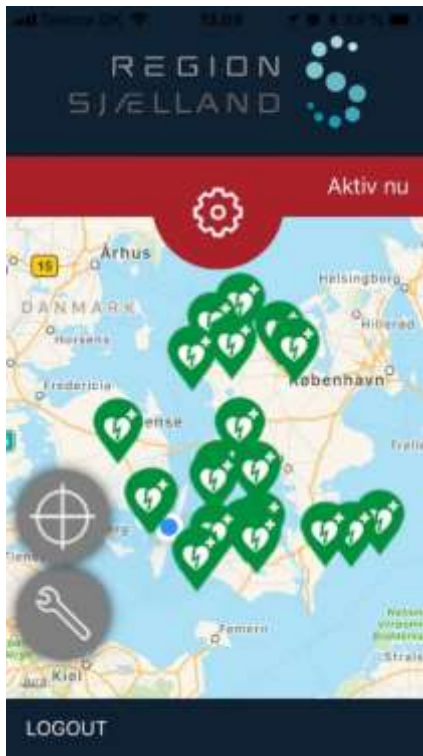


Normal visning

22:

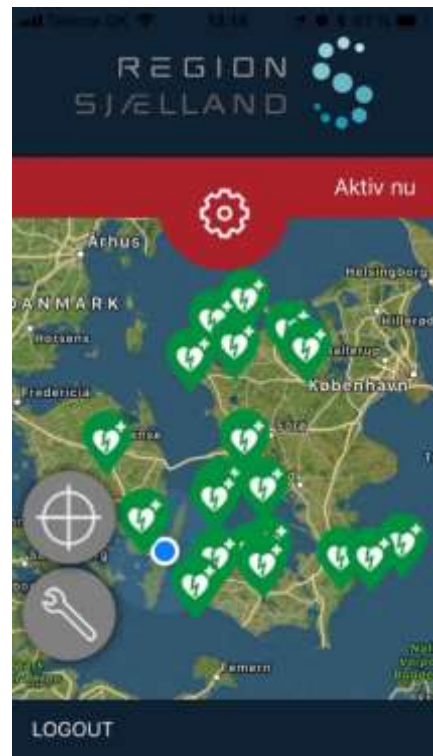

Satellit

23:

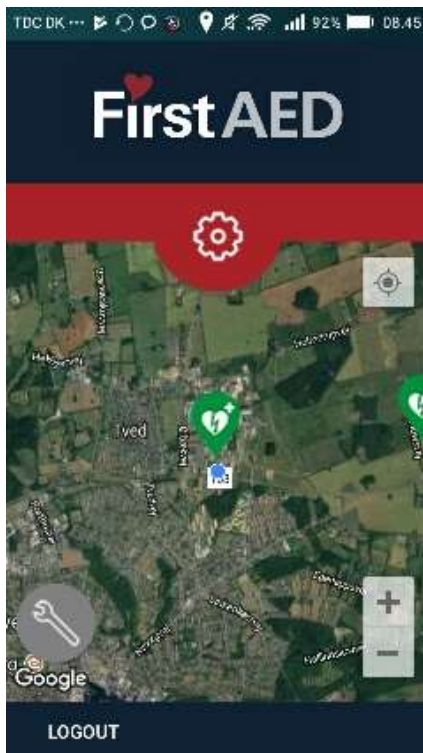


Ved tryk på "møllehjulet" – se billede 24.

24:



25:

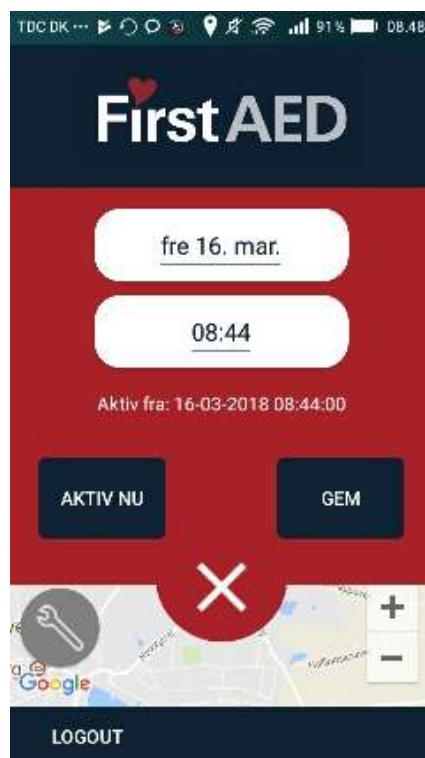

Hvis du vil skifte tidspunkt for enten dato eller tid, trykker du først på dato og scroller ned til den ønskede dato, hvorefter man trykker på "GEM". Det samme gøres med tid. Her vises nu fra, HVORNÅR du igen er aktiv.

Du har også mulighed for KUN at stille dig "AKTIV NU". I så fald trykker du KUN på knappen "AKTIV NU" OG ikke PÅ "gem".

Tryk på krydset for at komme tilbage til forsiden.

## 26: Driftdelen




## 27:



Ved alarm trykker du enten "NEJ" eller "JA". Hvis du trykker "JA", vises billede 28.


## 28:

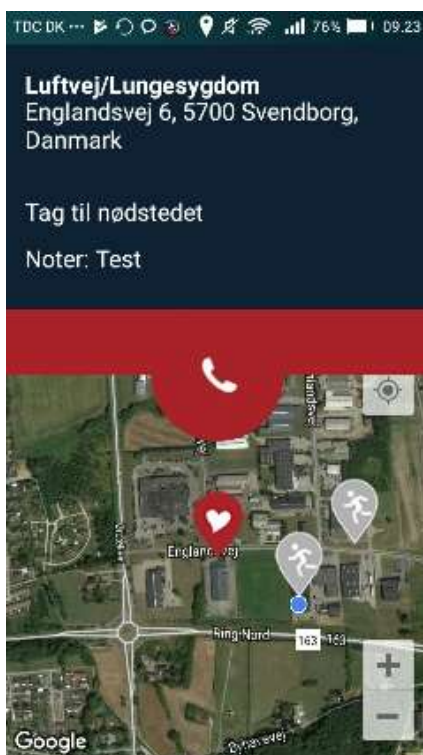


Hvis man bliver valgt til at deltage, modtager du en besked, som her "Tag til nødstedet".

Under "Noter" kan der stå uddybende information.

29:

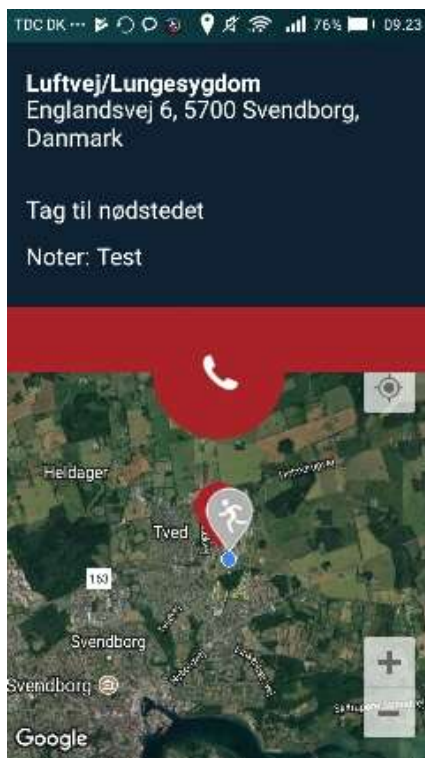


30:

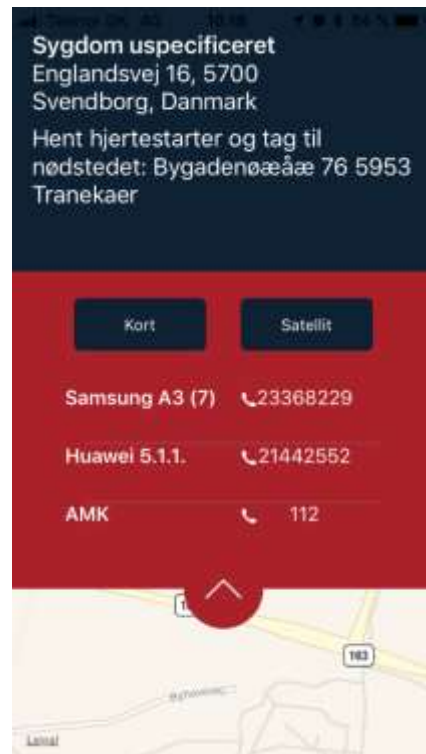

Ved tryk på telefonikonet ses alle telefonnumre. Du har også mulighed for at scrolle ned, for at se flere numre. Ved tryk på nummeret ringes der direkte op. Her har man også mulighed for at skifte fra satellit til kort eller omvendt.

31:

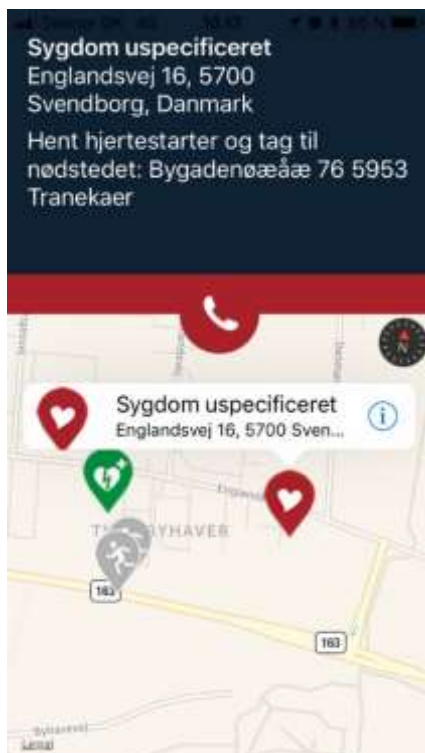


32:




Hvis du ønsker at blive navigeret til nødstedet eller hjertestarteren, så trykker man på det pågældende ikon og adressen bliver vist. Tryk herefter på feltet med adressen. Billede 32 vises - tryk OK og man bliver viderestillet til den talte navigation.

33:

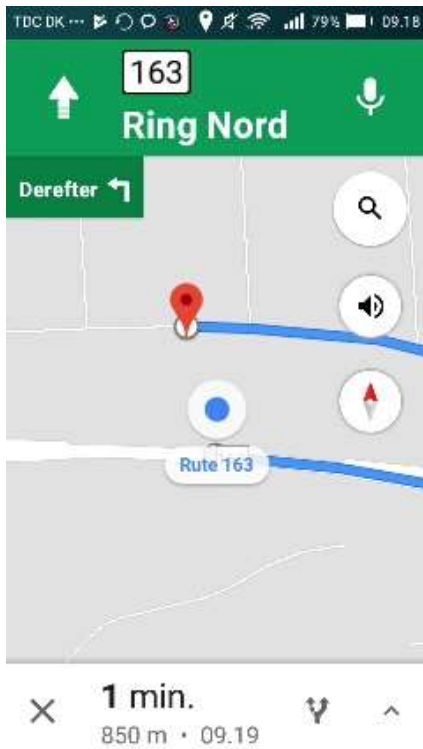


Ruten vises nu

34:

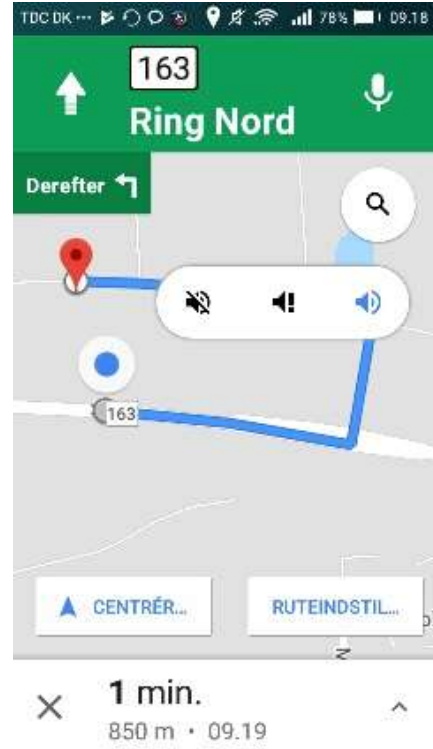

Husk at der skal være lyd på.  
Tryk på højtaleren for at sætte lyden til.


35:

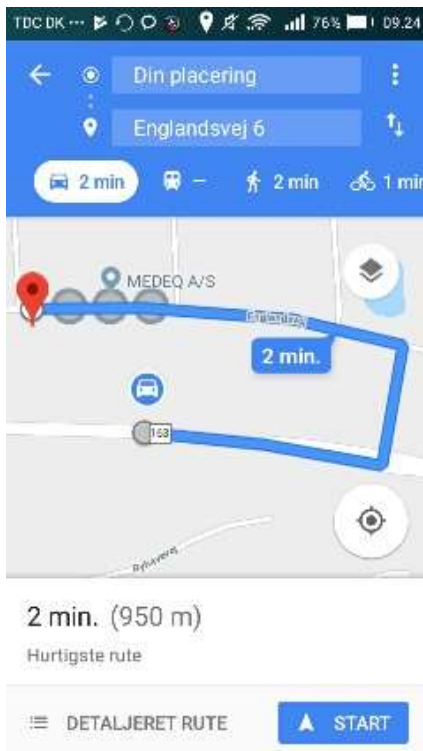


Tryk herefter på "START" og den talte navigation går i gang. Hvis man undervejs vil i kontakt med de andre akuthjælpere eller AMK, så trykker man på returknappen



36:

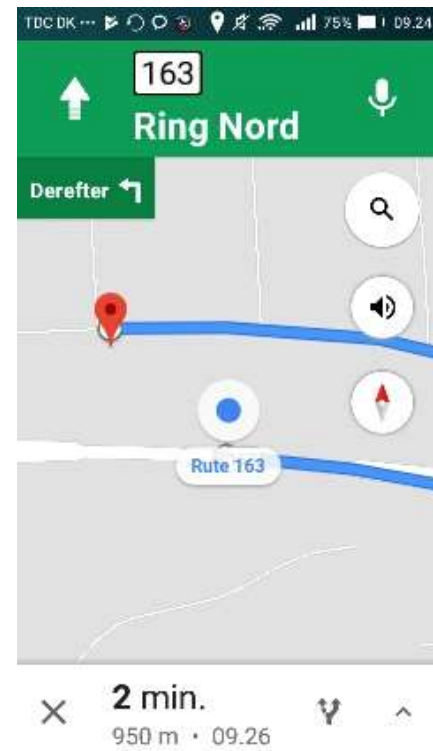

37:

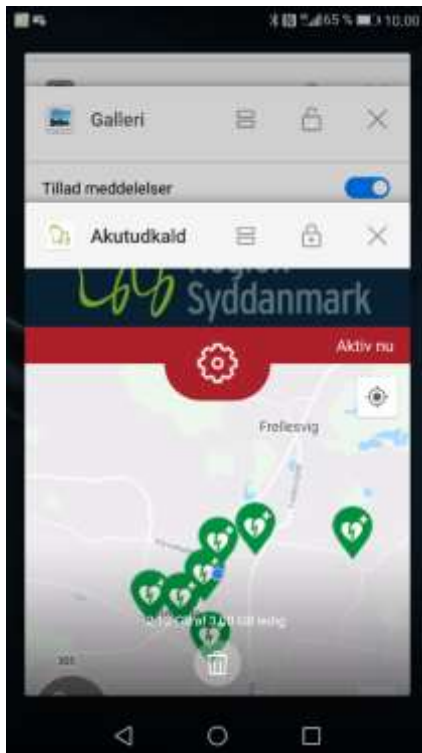


HUSK at app`en altid skal køre i baggrunden for at virke.

Lås derfor din baggrundsskærm, så mobilen ikke kan smide den væk. Hvordan du låser, er forskelligt fra mobil til mobil.

Strømbesparende tilstand skal derfor slås fra på mobilen.


Tryk på firkanten for at gå ind i dine baggrunds Apps

38: Opdatering

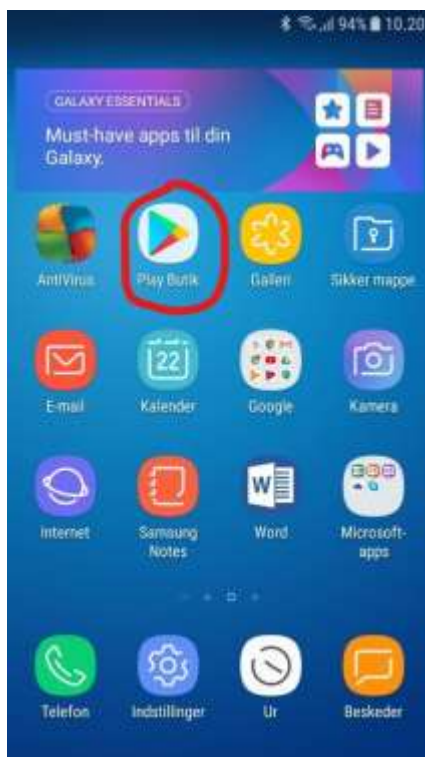


Gå altid ind i "Play Butik" og opdater

39:

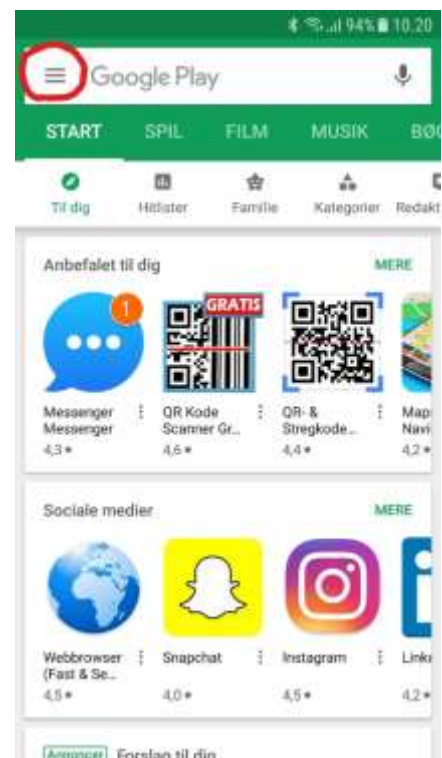

Tryk på de 3 små streger

40:

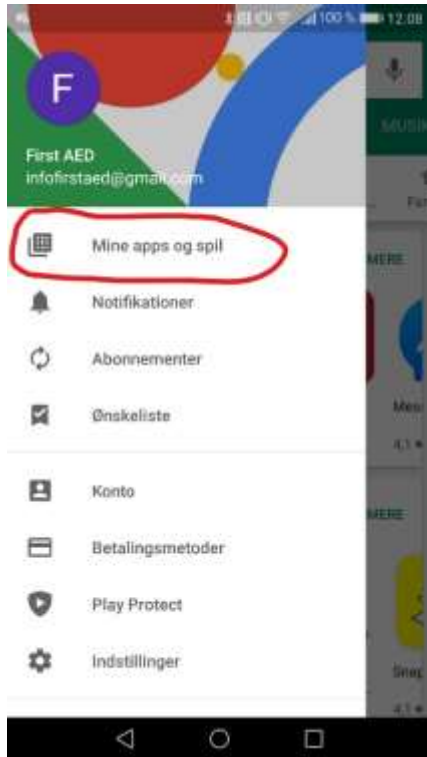

Tryk på "Mine apps og spil" og tryk opdater, hvis der er apps at opdatere.